

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig durch. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf; vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

EndWarts[®]

FREEZE

1. WAS IST ENDWARTS FREEZE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

EndWarts FREEZE ist eine schnelle Behandlung für zu Hause, die wirksam Warzen (gewöhnliche Warzen und Dornwarzen) an Händen, Armen und Füßen entfernt. Es ist das erste Mittel zur Selbstbehandlung mit Distickstoffmonoxid, einem Gas, das nach der Aktivierung des Gerätes sehr kalt ist. Durch seine Ultra Freeze Technology™ wird eine Temperatur von etwa -80 °C erreicht und die Warze wirksam vereist.

EndWarts FREEZE ist ein innovatives Produkt, das schnell und einfach anzuwenden ist. Die Behandlung ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ENDWARTS FREEZE BEACHTEN?

EndWarts FREEZE darf nicht angewendet werden


- bei Kindern unter 4 Jahren;
- im Gesicht, im Leisten- und Genitalbereich, auf der Kopfhaut oder der Schleimhaut;
- auf gesunder Haut (Haut ohne Warzen);
- auf Warzen, die sich auf empfindlicher Haut befinden. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Behandlung von Bereichen mit dünner Haut;
- wenn die Warze und/oder die sie umgebende Haut blutet, gereizt, infiziert oder gerötet ist oder juckt;
- wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei der Hautveränderung um eine gewöhnliche Warze handelt. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie EndWarts FREEZE anwenden;
- auf Dellwarzen, Leberflecken/Muttermalen, Hühneraugen, anderen Hautveränderungen oder auf Hautstellen, die möglicherweise Hautkrebs sein könnten (Melanom);
- auf mit Flüssigkeit gefüllten Hautbläschen oder auf anderen Hautbläschen;
- wenn Sie schwanger sind oder stillen;
- bei Diabetikern bzw. bei Personen, die Kreislaufprobleme oder Blutgerinnungsstörungen haben;
- auf mehreren Warzen zur gleichen Zeit, wenn diese nah beieinander liegen. Warten Sie 14 Tage, bevor Sie die nächste Warze behandeln.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht einatmen. Nur zur äußerlichen Anwendung.
- **Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich auf.**
- Nicht länger als 15 Sekunden an Händen und Armen bzw. 40 Sekunden an den Füßen anwenden. Eine übermäßig lange oder unsachgemäße Anwendung kann zu Schmerzen und Haut- bzw. Nervenschädigungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der gesunden, die Warze umgebenden Haut.
- Die Behandlung von Warzen bei Kindern mit EndWarts FREEZE darf nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

3. WIE IST ENDWARTS FREEZE ANZUWENDEN?

Nur vor dem ersten Gebrauch!

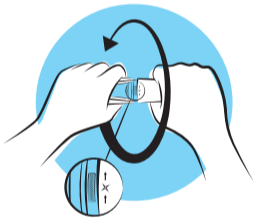

Führen Sie mit der Kappe eine volle Umdrehung aus, bis sich der Stern wieder im schattierten Bereich befindet. **Dafür müssen Sie eine gewisse Kraft aufwenden.**

Es ist kein Problem, wenn Sie den Stern über den schattierten Bereich hinaus drehen.

EndWarts FREEZE ist jetzt aktiviert.

Vor der Anwendung von EndWarts FREEZE

Für ein optimales Ergebnis bei Fußwarzen

Harte Haut auf der Warze erschwert die Vereisung. Um ein optimales Ergebnis bei Fußwarzen zu erzielen:



- Tauchen Sie den betroffenen Bereich in lauwarmes Wasser, bis die Haut weich ist.
- Bei nach innen wachsenden Warzen am Fuß entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig die **darüber liegende Haut** z.B. mit einer Fußfeile.

- Vergewissern Sie sich, dass die Warze und die umliegende Haut vor der Behandlung vollständig trocken sind.
- **Die Warze selbst soll nicht mit der Feile bearbeitet werden;** sie kann weich werden und eine neue harte Oberfläche bilden.

Anwendung in 3 Schritten



Stellen Sie EndWarts FREEZE auf eine flache und stabile Oberfläche. Halten Sie EndWarts FREEZE mit einer Hand fest, damit es nicht von der Fläche rutscht.

Drücken Sie den oberen Teil des Gerätes mit der anderen Hand mit ausreichend Druck zwei Sekunden lang nach unten.


Für das beste Ergebnis halten Sie bitte die Zeit genau ein!



Nehmen Sie die Kappe ab. Sie sollten **EISDAMPF** sehen.

Wenden Sie das Produkt sofort an!

Falls kein Eisdampf austritt, wiederholen Sie Schritt 1.

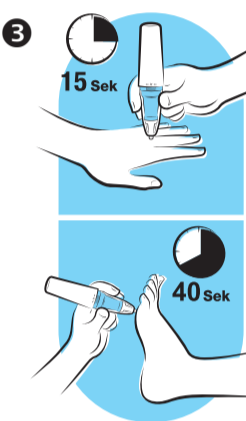

Drücken Sie die Spitze von EndWarts FREEZE fest auf die Warze.

Für das beste Ergebnis halten Sie bitte die Zeit genau ein!

15 Sekunden an Fingern, Händen und Armen

40 Sekunden an den Füßen

Warten Sie nach Behandlung der Warze zwei Minuten, bevor Sie die Einweg-Spitze mit einem Papiertuch vom Gerät entfernen. **Entsorgen Sie die Einweg-Spitze nach jedem Gebrauch, ersetzen Sie diese durch eine neue und setzen Sie anschließend die Kappe wieder auf.** Verwenden Sie die Einweg-Spitze nicht erneut und berühren Sie sie nicht mit bloßen Händen, damit Sie die Haut nicht erneut mit dem Warzenvirus infizieren.

EndWarts FREEZE ist nun für die nächste Verwendung einsatzbereit. Falls Sie die Kunststoffteile des Gerätes reinigen, verwenden Sie dafür nur ein feuchtes Tuch.

Nach der Behandlung mit EndWarts FREEZE

Die Anwendung von EndWarts FREEZE verursacht ein Kribbeln/Prickeln, und die Haut kann sich wund anfühlen. Dies sollte nach ein paar Stunden nachlassen. Der behandelte Bereich färbt sich unmittelbar nach der Behandlung weiß. Etwas später (das kann individuell zwischen Sekunden bis zu Minuten variieren) nimmt die Haut wieder ihre normale Farbe an, und die Warze sieht nun rot aus.

Nach dem Vereisen kann sich innerhalb von wenigen Minuten oder einigen Tagen eine Blase entwickeln, die manchmal mit Blut gefüllt ist. Dabei handelt es sich um eine normale Folge des Vereisungsprozesses, welche im Allgemeinen anzeigt, dass die Behandlung erfolgreich war. Versuchen Sie nicht, diese Blase zu öffnen. Schützen Sie diese, falls erforderlich, mit einem sterilen Verband, oder - falls die Blase aufgegangen ist - desinfizieren Sie diese sachgerecht.

Nach 10 bis 14 Tagen verschwindet die behandelte Warze langsam. Allerdings kann es etwas länger dauern, bis sich die Haut wieder vollständig erholt hat.

Befindet sich die Warze an der Fußsohle, kann das beim Gehen eventuell Schmerzen verursachen. Sie können Linderung schaffen, indem Sie ein rundes Hühneraugenpflaster in diesem Bereich aufkleben.

- Zupfen Sie nicht an der behandelten Stelle und versuchen Sie nicht, die Warze zu entfernen!
- Halten Sie den behandelten Bereich sauber und desinfizieren Sie ihn bei Bedarf.
- Baden und Duschen ist sofort nach der Behandlung erlaubt.

1. Was ist EndWarts FREEZE und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von EndWarts FREEZE beachten?
3. Wie ist EndWarts FREEZE anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist EndWarts FREEZE aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Muss ich die Behandlung wiederholen?

Im Allgemeinen ist eine einmalige Behandlung ausreichend. Bei alten oder großen Warzen kann mehr als eine Behandlung erforderlich sein, insbesondere, wenn sich diese unter der Fußsohle befinden.

Wiederholen Sie die Behandlung, falls die Warze (oder ein Teil davon) nach 14 Tagen nicht verschwunden ist. Wenn die Warze nach drei Behandlungen immer noch vorhanden ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt:

- wenn Sie oder Ihr Kind unerwartete Nebenwirkungen verspüren.
- wenn die Warze nicht abheilt.
- wenn die Warze nach drei Behandlungen nicht verschwunden ist.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen:

- Blasen um den behandelten Bereich - das ist von Fall zu Fall unterschiedlich (siehe in Abschnitt 3: „Nach der Behandlung mit EndWarts FREEZE“).
- Die Haut verliert vorübergehend ihre Farbe - man nennt das „Depigmentierung“.
- Leichte Verbrennungen und Narbenbildung.
- Risiko von Haut- bzw. Nervenschädigungen (z.B. im Falle einer zu langen Anwendungsdauer).

5. WIE IST ENDWARTS FREEZE AUFZUBEWAHREN?

- Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Lagerbedingungen

Vor der ersten Anwendung:

- Trocken und kühl lagern (bei 5 - 25 °C).
- Nicht im Gefrierschrank aufbewahren.
- Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Nicht im Auto, Wohnwagen oder an anderen Orten, die sich aufheizen, aufbewahren. Ein Temperaturanstieg schädigt das Gerät und macht es dauerhaft funktionsunfähig.
- Von Feuer und Wärmequellen fernhalten.

Nach jedem Gebrauch:

- **Im Kühlschrank lagern** (bei 2-8 °C), um die Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.
- Nicht im Gefrierschrank aufbewahren.
- Nicht Temperaturen über 35 °C aussetzen, da sonst ein Sicherheitsmechanismus aktiviert wird, welcher das Gerät dauerhaft funktionsunfähig macht.
- Haltbarkeit im Kühlschrank nach dem ersten Gebrauch: 2 Monate.

Achtung

- Distickstoffmonoxid ist ein ungiftiges, nicht brennbares, jedoch brandförderndes Gas. Von offenen Flammen und leicht brennbaren Materialien fernhalten. Nicht rauchen und nicht in der Nähe von offenen Flammen anwenden.
- **Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen** - das Gerät steht unter hohem Druck und darf nicht geöffnet werden.

Was müssen Sie tun, wenn das Produkt leer oder funktionsunfähig ist?

- Wenn nach der Aktivierung (Schritt 1) kein Eisdampf zu sehen ist, ist kein Gas mehr enthalten. Benutzen Sie ein neues EndWarts FREEZE.
- Wenn nach der Aktivierung des Produkts ein kontinuierliches Zischen auftritt und das gesamte Gas austritt, ist das Gerät defekt. Versuchen Sie nicht, dieses zu öffnen oder selbst zu reparieren, sondern geben Sie das Produkt in Ihrer Apotheke zurück.
- Entsorgen Sie das leere Produkt entsprechend der geltenden Vorschriften für die Entsorgung von Hausmüll.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Jede Packung enthält eine EndWarts FREEZE-Kartusche mit 7,5 g Distickstoffmonoxid (verflüssigt), ein Set mit 6 Einweg-Spitzen sowie eine Gebrauchsanweisung.